

Oxivir® Excel™ Wipe

Pesevä desinfektiopyyhe myös lääkinnällisille laitteille

Tuotteen kuvaus

Oxivir Excel Wipe -pyyhe on kehitetty laajakirjoiseen, yksivaiheiseen desinfiivaan puhdistukseen. Tuotteen vaikutusaika on lyhyt ja sen teho perustuu patentoituun AHP-teknologiaan (Accelerated Hydrogen Peroxide). Tuote soveltuu vettäsietäville koville pinnoille sekä ei-invasiivisille lääkinnällisille laitteille (CEIIa).

Ominaisuudet

- Tehooa bakteereihin, viruksiin ja hiivoihin
- Desinfioi jopa 1 minuutissa
- Turvallinen käyttäjälle ja pinnoille
- Käyttövalmis ja helppokäyttöinen
- Hyvä pesuteho
- Hajusteeton
- Aktiiviaineet hajoavat vedeksi ja hapeksi
- Ei vaadi huuhtelua, kerrostumatonta

Edut


- Tuotteen teho on todistettu kattavasti EN-testein. Tehooa useisiin patogeeneihin mm. polio-, adeno- ja murine noro -viruksiin. Tehooa myös kaikkiin vaipallisiin viruksiin, kuten HI-, HB-, HC-, influenssa-, vaccinia- ja corona -viruksiin.
- Desinfektion toteutumiseen vaadittavat kontaktiajat ovat tällä tuotteella lyhyitä, näin desinfektio ehtii toteutua ennen pinnan kuivumista.
- Erinomainen puhdistuskyky.
- Turvallinen käyttää. Ei ärsytä silmiä eikä ihoa.
- AHP-koostumus on turvallinen pinnoille.
- Soveltuu käytettäväksi myös terveydenhuollon korkean riskin kohteissa mukaan lukien leikkaussalit, teho-osastot ja potilashuoneet.

Käyttöohjeet

1. Poista näkyvä lika.
2. Avaa pyyhepakkaus, ota pakkauksesta yksi pyyhe ja sulje kansi.
3. Pyyhi pinta ja anna kuivua.
4. Ota uusi pyyhe, kun käytössä oleva pyyhe ei kostuta pintaa riittävästi, kun pinta on silminnähtävästi likainen tai kun siirryt seuraavaan puhdistuskohteeseen.

Tärkeää: Älä käytä muiden kemikaalien kanssa. Ei saa käyttää pinnoille, jotka eivät siedä vettä tai happoa. Käytä suojakäsineitä.

CE
0088

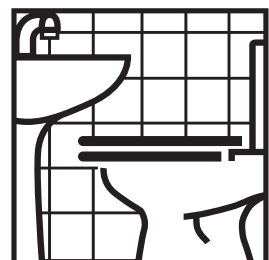

© A.I.S.E.

Oxivir® Excel™ Wipe

Pesevä desinfektiopyyhe myös lääkinnällisille laitteille

Tekniset tiedot

Ulkonäkö:	polypropyleenistä valmistettu pyyhe
Suhteellinen tiheys (20 °C):	1,000
pH-arvo, käyttövalmis:	1,95
Syttymispiste:	N/A
Säilyvyys:	2 vuotta avaamattomana, 28 vrk avattuna
Tuoksu:	Hajusteeton

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannolle. Niitä ei tule käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Turvalliseen käsittelyyn ja hävittämiseen liittyvät tiedot ks. käyttöturvallisuustiedote. Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Reagoi hapettuvien tuotteiden kanssa.

Tuotteen yhteensopivuus

Oxivir Excel Wipe -pyyhe soveltuu käytettäväksi useimmille käytössä oleville materiaaleille suositelluissa käyttöolosuhteissa.

Ympäristötiedot

Tuotteessa käytetyt pinta-aktiiviset aineet ovat täysin biohajoavia EU:n pesuainedirektiivin EC 648/2004 mukaan.

Mikrobiologiset tiedot

Desinfektiooteho on todettu EN-testein: EN1276, EN13727, EN13697, EN16615, EN14476, EN1650, EN13624.

Pakkaustiedot:

Pakkauskoko	Pyyhkeen koko
12 x 100 kpl	200 x 300 mm
12 x 100 kpl	200 x 267 mm (pehmytpakkaus)
12 x 30 kpl	200 x 267 mm (pehmytpakkaus)